

Instrucțiuni de recoltare probă de celule bucale



Acesta este un kit de recoltare pentru celule bucale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de recoltare și păstrați cutia de transport pentru ambalarea și preluarea probei.



30 MIN

Nu consumați alimente, băuturi, nu fumați, nu mestecați gumă cu cel puțin 30 de minute înainte de recoltarea probei de celule bucale.

Deschiderea pachetului

Deschideți cutia kit-ului

1

Citiți cu atenție formularul de consimțământ, bifați opțiunile preferate de pe pagina 5 și semnați pe pagina 6.

2

Colectarea probei

Deschide punga și scoateți tubul de plastic

3

Pentru a facilita deschiderea tubului țineți tubul cu o mână și deșurubați capacul albastru. Așezați tubul cu soluția de preservare albastră pe o suprafață plană, cu atenție să nu vărsați soluția.

4

Introduceți tamponul în cavitatea bucală între gingia de jos și obraz și frecați de 10 ori de fiecare parte a cavității bucale.

5

Pregătirea probei pentru transport

După recoltarea probei, introduceți tamponul bucal în tubul de plastic și întoarceți-l cu susul în jos de 10 ori pentru a asigura impregnarea tamponului cu soluția de preservare.

6

Introduceți tubul în punga cu sigiliu marcată cu "SAFETYBAG" și sigilați punga

7

Introduceți punga cu proba de celule bucale și consimțământul semnat înapoi în cutia de transport

8

Contactați-ne la office@helixomic.ro pentru preluarea probei. În email vă rog să specificați adresa de unde doriți să fie preluată proba

9